

Fremgangsmåte for å koble ut et rom på NESK100 pasientsignalanlegg som ikke lar seg avstille.

Gå til det aktuelle rommet og demonter NESK116 avstillings- og tilstedemarkeringspanel.

Dette utføres ved å trykke panelet opp i unnerkant og trekke panelet ut i overkant.

Panelet skal nå være fri fra sneppfestet som er fastmontert i veggen



På baksiden av panelet er det 2 kontakter som kan løsnes fra enheten.

Det er den 6 polige kontakten som skal løsnes/frigjøres fra enheten.

Hold det grønne mønsterkortet fast med den ene hånden mens du drar den 6 polige kontakten rett ut. Når denne er fri er rommet frakoblet resten av avdelingen.

Ha hyppige besøk på dette rommet gjennom natten for å se om pasienten trenger hjelp.

Etter kl. 08:00 kan dere ringe NESK for å få rettet på feilen.

